

MT06MD

Характеристики

- Специализированный фонарь для медицинского осмотра
- Используется светодиод Nichia 219B LED (CRI>90), макс. мощность 180 люмен
- Фотобиологический безопасен (RG0), цветовая температура CCT=5000K
- По умолчанию включается в режиме "низкой" яркости". удобен и идеален для осмотров зрачков
- Питание от 2 батарей AAA, макс. время работы до 35 часов
- 3 уровня яркости
- Обратный концевой переключатель обеспечивает легкость управления одной рукой
- Высокопроизводительная цепь постоянного тока обеспечивает устойчивую и согласованную мощность
- Зажим из нержавеющей стали
- Конструкция из алюминиевого сплава аэрокосмического стандарта качества
- Твёрдое анодированное покрытие HAIII
- IPX8 (допустимое погружение на глубину до 2 метров)
- Пригоден для стерилизации с использованием спирта
- Ударопрочность при падении с высоты до 1,5 метров

Размеры

Длина: 5,04" (128 мм)

Диаметр головки: 0,55" (14 мм)

Диаметр концевой части: 0,55" (14 мм)

Масса: 0,78 унций (22 грамма) (без батареи)

Аксессуары

Запасное уплотнительное кольцо

Включение/Выключение

При выключенном свете нажать переключатель до различимого на слух щелчка, чтобы сразу войти в режим низкой мощности. Нажать переключатель ещё раз для полного выключения.

Регулировка яркости

При включённом свете повторно активировать MT06MD в течение двух секунд или просто нажать переключатель наполовину для последовательного переключения яркости "низкая - средняя - высокая".

После выключения на 2 секунды MT06MD по умолчанию включается для работы в режиме "низкого" уровня яркости.

ПРИМЕЧАНИЕ: MT06MD начнёт регулировать люмены мощности автоматически после 5 минут использования, предотвращая таким образом перегрев и продлевая срок

использования батареи.

Замена батарей

Замену следует выполнять, когда яркость свечения фонаря снижается, или фонарь перестаёт работать при нажатии кнопок

Обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбовые соединения необходимо протирать чистой тканью и обрабатывать с использованием смазки на силиконовой основе.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любая продукция NITECORE®, имеющая дефекты/неисправности, может быть бесплатно отремонтирована в течение 60 месяцев (5 лет) с даты приобретения. По истечении 60 месяцев (5 лет) вступает в силу ограниченная гарантия, покрывающая стоимость работ и технического обслуживания, без учета стоимости запасных частей и дополнительных принадлежностей.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

1. изделие разобрано, либо в его конструкцию внесены изменения лицами, не уполномоченными на это.
2. продукция повреждена в результате неправильной эксплуатации.
3. продукция повреждена в результате саморазряда батарей.

Для получения оперативной информации о гарантийном обслуживании продукции NITECORE обращайтесь к местному дистрибьютору либо посылайте сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com.

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве, могут быть использованы только в справочных целях. При расхождении информации, приведённой в настоящем руководстве, с информацией, размещённой на сайте www.nitecore.com, преимущественную силу имеет информация, размещённая на нашем официальном веб-сайте. Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право в любой момент истолковывать и изменять содержание настоящего документа без предварительного уведомления.